

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	CLOT PREVENTION ALAT MEDONIC HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	P/SPO/02/065	00	1 /1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
	16 Januari 2017		

PENGERTIAN	Clot Prevention alat Medonic Hematologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu bulan (1000 sampel) untuk pemeliharaan alat Medonic Hematologi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis).
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Medonic Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Siapkan botol yang berisi larutan pembersih enzimatik 2. Pilih (Advanced) 3. Pilih (Maintenance) 4. Pilih (Clot Prevention) 5. Letakkan botol larutan pembersih enzimatik di bawah jarum aspirasi 6. Tekan (Ok), 7. Tunggu kira – kira 5 detik, jangan lepaskan botol 8. Lakukan background 9. Pastikan hasil background masuk Range 10. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	