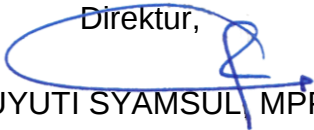


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsss.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PENGANTIAN TANGKI LIMBAH QUINTUS HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/096	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Penggantian tangki limbah Quintus Hematologi Analyzer dilakukan apabila tangki limbah alat Quintus Hematologi Analyzer penuh, untuk memelihara alat Quintus Hematologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Quintus Hematologi Analyzer bagi petugas laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Siapkan tangki limbah yang kosong 2. Masuk ke (Main Menu) 3. Pilih (Advanced) 4. Tekan (Reagent). 5. Tekan (Reset Waste). 6. Pilih (Back). 7. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	