

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div></div> <div><b>RSUD Sultan Imanuddin<br/>Pangkalan Bun</b></div> <div>Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun<br/>Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581<br/><a href="http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id">http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id</a><br/>email : rsudpbun@gmail.com</div> | <b>HARD CLEANING QUINTUS HEMATOLOGI<br/>ANALYZER</b> |                                                                                                                                                                                                      |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No. Dokumen :<br><br>P/SPO/02/067                    | No. Revisi :<br><br>00                                                                                                                                                                               | Halaman :<br><br>1 / 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tanggal Terbit :<br><br>16 Januari 2017              | <div>Ditetapkan<br/>Direktur,</div> <div></div> <div>dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM<br/>NIP. 19680807 200003 1 006</div> |                        |
| <b>STANDAR PROSEDUR<br/>OPERASIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENGERTIAN</b>   | Hard Cleaning Quintus Hematologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu minggu, untuk memelihara alat Quintus Hematologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium ( Analis )                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TUJUAN</b>       | Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Quintus Hematologi Analyzer bagi petugas laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>KEBIJAKAN</b>    | Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PROSEDUR</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masuk ke ( Main Menu ).</li> <li>2. Pilih ( Advanced ).</li> <li>3. Pilih ( Maintenance ).</li> <li>4. Pilih ( Clean ).</li> <li>5. Pilih highlight tombol ( Hard Cleaning ).</li> <li>6. Buka tutup tabung hypochlorite 2%</li> <li>7. Masukkan ke dalam Sample Rotor</li> <li>8. Tekan ( Ok ).</li> <li>9. Tunggu hingga proses selesai dan tombol start berwarna kuning.</li> <li>10. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.</li> </ol> |
| <b>UNIT TERKAIT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |