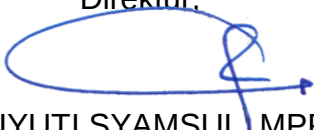


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PENGANTIAN FILTER ALAT HbA1C		
	No. Dokumen : P/SPO/02/074	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur.  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Penggantian Filter alat HbA1C dilakukan apabila filter alat HbA1C sudah kotor, untuk memelihara alat HbA1C dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis).
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat HbA1C bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Matikan alat 2. Buka tutup tempat filter 3. Lepaskan filter yang lama. 4. Pasang filter yang baru. 5. Tutup kembali tempat filter 6. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	