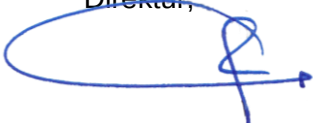


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MEMATIKAN ALAT FOTOMETER SEMI-AUTOMATIC		
	No. Dokumen : P/SPO/02/015	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Mematikan alat Fotometer Semi-Automatic dilakukan satu kali dalam satu hari (malam hari), untuk memelihara alat Fotometer Semi-Automatic dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Fotometer Semi-Automatic bagi petugas laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Kembali ke (Main Menu) 2. Lakukan pencucian dengan aquadest 3. Tekan tombol (Off). 4. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist
UNIT TERKAIT	