

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsss.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	CLEANING TOOLS NEEDLE FOTOMETER FULL AUTOMATIC		
	No. Dokumen : P/SPO/02/007	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Cleaning Tools Needle Fotometer Full Automatic dilakukan satu kali dalam satu minggu untuk memelihara alat Fotometer Full Automatic dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Fotometer Full Automatic bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Matikan alat. 2. Lepaskan jarum. 3. Bersihkan jarum bagian dengan alkohol. 4. Bersihkan bagian dalam jarum dengan kawat pembersih 5. Pasang kembali jarum ke tempat semula 6. Hidupkan alat. 7. Lakukan extra wash cuvettes. 8. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	