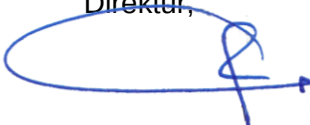


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsss.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	DAYLI CLEANER ELECTROLYTE ANALYZER		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	P/SPO/02/010	00	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
	16 Januari 2017		

PENGERTIAN	Dayli Cleaner Electrolyte Analyzer dilakukan satu kali dalam satu hari, untuk memelihara alat Electrolyte Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Electrolyte Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Siapkan cleaner.. 2. Pilih (Dayli Cleaner), jarum aspirasi akan diturunkan 3. Letakkan cleaner di bawah jarum. 4. Tekan (yes), jarum akan mengisap cleaner. 5. Tarik cleaner jika jarum sdh kembali naik ke atas 6. Lakukan kalibrasi setelah selesai dayli cleaner 7. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist
UNIT TERKAIT	