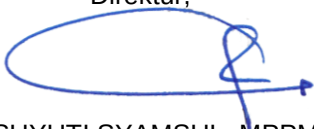


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <p><b>RSUD Sultan Imanuddin<br/>Pangkalan Bun</b></p> <p>Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun<br/>Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581<br/><a href="http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id">http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id</a><br/>email : rsudpbun@gmail.com</p> <p><b>STANDAR PROSEDUR<br/>OPERASIONAL</b></p> | <b>AUTO RINSE SYSMEX KX-21<br/>HEMATOLOGI ANALYZER</b> |                                                                                                                                                                                                         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. Dokumen:<br>P/SPO/02/062                           | No. Revisi :<br>00                                                                                                                                                                                      | Halaman :<br>1 dari 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tanggal Terbit :<br><br>16 Januari 2017                | <p>Ditetapkan<br/>Direktur,</p>  <p>dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM<br/>Pembina Tingkat I<br/>NIP. 19680807 200003 1 006</p> |                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENGERTIAN</b>   | Auto rinse Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan apabila hasil background alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer error, untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium ( Analis ) |
| <b>TUJUAN</b>       | Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium                                                                                                                                                                      |
| <b>KEBIJAKAN</b>    | Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun                                                                                                                                                |
| <b>PROSEDUR</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan alat dalam status ready.</li> <li>2. Tekan tombol select.</li> <li>3. Tekan tombol ( 5 ) auto rinse.</li> <li>4. Jalankan background secara otomatis.</li> <li>5. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.</li> </ol>                 |
| <b>UNIT TERKAIT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |