

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <p><b>RSUD Sultan Imanuddin<br/>Pangkalan Bun</b></p> <p>Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun<br/>Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581<br/><a href="http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id">http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id</a><br/>email : rsudpbun@gmail.com</p> | <b>CLEANING INSTRUMENT QUINTUS<br/>HEMATOLOGI ANALYZER</b> |                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Dokumen :                                              | No. Revisi :                                                                                                                                                                                            | Halaman : |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P/SPO/02/066                                               | 00                                                                                                                                                                                                      | 1/ 1      |
| <b>STANDAR PROSEDUR<br/>OPERASIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanggal Terbit :                                           | <p>Ditetapkan<br/>Direktur,</p>  <p>dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM<br/>Pembina Tingkat I<br/>NIP. 19680807 200003 1 006</p> |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 Januari 2017                                            |                                                                                                                                                                                                         |           |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENGERTIAN</b>   | Cleaning instrument Quintus Hematologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu hari untuk memelihara alat Quintus Hematologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium ( Analis )                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TUJUAN</b>       | Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Quintus Hematologi Analyzer bagi petugas laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>KEBIJAKAN</b>    | Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PROSEDUR</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masuk ke ( Main Menu ).</li> <li>2. Pilih ( Advanced ).</li> <li>3. Pilih ( Maintenance ).</li> <li>4. Pilih ( Clean ).</li> <li>5. Pilih highlight tombol Clean.</li> <li>6. Buka tutup tabung hypochlorite 2%.</li> <li>7. Masukkan ke dalam Sample Rotor.</li> <li>8. Tekan ( Ok ).</li> <li>9. Tunggu hingga proses selesai dan tombol start berwarna kuning.</li> <li>10. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.</li> </ol> |
| <b>UNIT TERKAIT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |