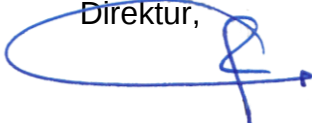


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MEMBERSIHKAN RINSE CUP SYSMEX KX-21 HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/081	No. Revisi : 00	Halaman : 1/ 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Membersihkan rinse cup Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan apabila hasil background alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer error, untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Matikan alat. 2. Tunggu 30 detik. 3. Turunkan rinse cup. 4. Lepas kedua selang yang tersambung. 5. Cuci rinse cup dengan air. 6. Keringkan rinse cup. 7. Pasang kembali kedua selang. 8. Pasang rinse cup dengan benar. 9. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	