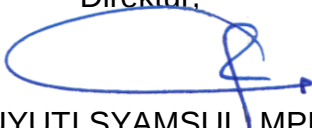


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <p><b>RSUD Sultan Imanuddin<br/>Pangkalan Bun</b></p> <p>Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun<br/>Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581<br/><a href="http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id">http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id</a><br/>email : rsudpbun@gmail.com</p> | <b>SHUTDOWN SYSMEX KX-21<br/>HEMATOLOGI ANALYZER</b> |                                                                                                                                                                         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No. Dokumen :<br>P/SPO/02/099                        | No. Revisi :<br>00                                                                                                                                                      | Halaman :<br>1 / 1 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tanggal Terbit :<br><br>16 Januari 2017              | Ditetapkan<br>Direktur,<br><br>dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM<br>NIP. 19680807 200003 1 006 |                    |
| <b>STANDAR PROSEDUR<br/>OPERASIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                         |                    |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PENGERTIAN</b>   | Shutdown Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu hari untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium ( Analis ).                                                                                                                                               |
| <b>TUJUAN</b>       | Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KEBIJAKAN</b>    | Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PROSEDUR</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan alat dalam status ready</li> <li>2. Tekan tombol shutdown.</li> <li>3. Letakkan cellclean di bawah aspiration probe</li> <li>4. Tekan start switch.</li> <li>5. Tarik cellclean setelah bunyi beep dua kali</li> <li>6. Matikan alat setelah pesan turn off the power.</li> <li>7. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.</li> </ol> |
| <b>UNIT TERKAIT</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |