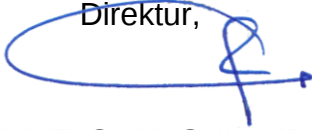


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PRIME QUINTUS HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/098	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Prime Quintus Hematologi Analyzer dilakukan apabila ada gelembung udara di dalam selang alat Quintus Hematologi Analyzer, untuk memelihara alat Quintus Hematologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Quintus Hematologi Analyzer bagi petugas laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Pastikan instrument tidak dalam keadaan running (tombol tidak berwarna merah) 2. Masuk ke (Main Menu) 3. Pilih (Advanced). 4. Pilih (Maintenance) 5. Tekan (Prime), highlight reagen yang ada gelembung udara 6. Tekan (Ok). 7. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	