

 <p><b>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun</b> Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 <a href="http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id">http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id</a> email : rsudpbun@gmail.com</p>	<b>MEMBERSIHKAN BAGIAN BELAKANG SPR BLOCK SEROLOGI ANALYZER</b>		
	No. Dokumen : P/SPO/02/018	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit :  16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Membersihkan bagian belakang SPR Block Serologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu minggu untuk memelihara alat Serologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium ( Analis )
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Serologi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matikan alat.</li> <li>2. Usap bagian belakang SPR Block dengan sponge yang telah dibasahi dengan detergen.</li> <li>3. Ulang dengan menggunakan sponge baru yang telah dibasahi dengan hipoklorit 0,5 – 0,6%</li> <li>4. Diamkan selama 10 menit.</li> <li>5. Usap bagian belakang SPR Block sebanyak tiga kali dengan sponge baru yang telah dibasahi dengan aquadest.</li> <li>6. Kembalikan alat pada posisi awal.</li> <li>7. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.</li> </ol>
UNIT TERKAIT	