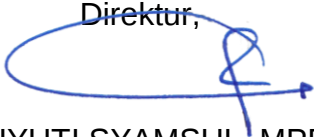


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbn@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	MEMERIKSA TRAP CHAMBER SYSMEX KX-21 HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/086	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Memeriksa trap chamber Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu hari untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Lihat trap chamber apakah ada cairan atau tidak. 2. Lakukan langkah – langkah sebagai berikut, apabila ada cairan a. Matikan alat. b. Tunggu 30 detik. c. Buka trap chamber. d. Buang cairan e. Bersihkan f. Keringkan. g. Pasang kembali trap chamber 3. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	