

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PENGANTIAN FUSE SYSMEX KX-21 HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/090	No. Revisi : 00	Halaman : 1/ 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Penggantian Fuse Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan pada saat alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer tidak bisa dinyalakan, untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analisis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1.Siapkan fuse Sysmex KX-21 yang baru. 2.Buka pintu fuse yang berada di sebelah kiri alat 3.Tarik keluar dudukan fuse 4.Lepas fuse dari tempatnya. 5.Pasang fuse yang baru 6.Pasang kembali dudukan fuse ke tempat semula. 7.Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist
UNIT TERKAIT	