

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PEMELIHARAAN MONITOR TENSI DAN SATURASI		
	No. Dokumen: M/SPO/05/052	O₂ No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

Pengertian	Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kualitas kelayakan suatu alat agar alat tersebut senantiasa berfungsi dengan baik.
Tujuan	- Menjamin keberadaan alat-alat - Untuk menghindari kerusakan alat yang lebih fatal - Memberi kualitas pelayanan kepada pasien secara optimal.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	<u>Alat dan bahan yang digunakan :</u> - Air - Lap kerja lembab - Alkohol 70% - Lap kerja kering - Sarung tangan <u>Langkah Kerja :</u> - Lepaskan hubungan alat ke listrik. - Pasang sarung tangan. - Lap dengan lap lembab semua sisi monitor. - Keringkan dengan lap kering kemudian desinfeksi dengan lap yang telah dibasahi dengan alkohol 70%. - Manset tensimeter dicuci bila sudah kotor kemudian keringkan. - Set alat kembali kemudian cek fungsinya. - Cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja.
Unit Terkait	- Staff IBS - IPSRS