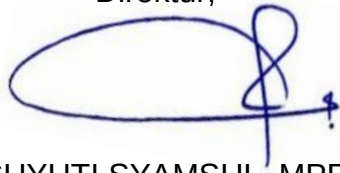


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PENGOPERASIAN ALAT COMPUTED RADIOGRAFI (CR) FUJI		
	No. Dokumen:	No. Revisi :	Halaman : 1/2
	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017		Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

Pengertian	Alat Computed Radiography adalah alat yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mencetak foto hasil pemotretan sinar-x dalam bentuk digital.
Tujuan	Untuk pedoman mengoperasikan alat Computed radiografi (CR) merk careestreem secara benar.
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017, Tentang Kebijakan Pelayanan di Instalasi Radiologi RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Prosedur	1. Petugas pelaksana pengoperasian alat adalah Radiografer. 2. Pelaksanaan pengoperasian di ruang radiologi. 3. Hidupkan alat sebelum pemeriksaan, dan dimatikan bila seluruh pemeriksaan selesai. 4. Operasikan menggunakan Sumber tegangan listrik 3 <i>phase</i> yang stabil sebesar 220 volt/60 <i>Hertz</i>. 5. Langkah-langkah: a. Menghidupkan : – Tekan tombol power “ON” pada UPS – Tekan power CPU CR. – Tekan tombol power Tekan “power on/off”

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532) 21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PENGOPERASIAN ALAT COMPUTED RADIOGRAFI (CR) FUJI		
	No. Dokumen:	No. Revisi :	Halaman : 2/2
	Tanggal Terbit: 16 Januari 2017 Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

	kearah "ON" pada <i>Image Reader/ scanner CR</i>. – Tekan tombol power <i>printer CR</i> . – Tunggu proses loading. b. Mematikan : – Klik shutdown pada monitor console CR. – Tekan "power on/off" kearah off pada scanner – Tekan tombol "off" pada printer CR - Tekan tombol power "OFF" pada UPS
Unit Terkait	IPSRS