

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsss.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	CLEANING ALAT MEDONIC HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
	P/SPO/02/064	00	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
	16 Januari 2017		

PENGERTIAN	Cleaning alat Medonic Hematologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu bulan, untuk pemeliharaan alat Medonic Hematologi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis).
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Medonic Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Bersihkan jarum aspirasi dengan tissue alkohol 70% 2. Letakkan 10 ml larutan Hypochlorite 2% di bawah jarum aspirasi 3. Tekan switch, tunggu sampai proses selesai 4. Jalankan 2 sampel yang isinya cairan Diluent 5. Lakukan background 6. Pastikan hasil background masuk Range 7. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	