

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsss.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PENGANTIAN DILUENT SYSMEX KX-21 HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/088	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Penggantian Diluent Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan pada saat reagen diluent alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer habis, untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analisis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1.Siapkan reagen diluent yang baru. 2.Lepaskan selang pada reagen diluent yang lama 3.Pasang selang pada reagen diluent yang baru 4.Tekan (1) Aspiration. 5.Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	