

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	EXTRA WASH CUVETTES FOTOMETER FULL AUTOMATIC		
	No. Dokumen : P/SPO/02/011	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Extra wash cuvettes Fotometer Full Automatic dilakukan satu kali dalam satu minggu untuk memelihara alat Fotometer Full Automatic dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Fotometer Full Automatic bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Pastikan alat dalam status ready. 2. Pastikan larutan extra wash di posisi (24) sudah terisi (botol kecil). 3. Pilih (Analyzer Utilitis). 4. Pilih (Extra Wash Cuvettes). 5. Tekan (Yes). 6. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	