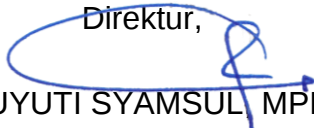
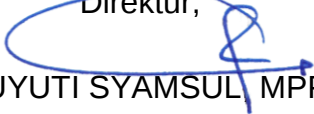


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PENGANTIAN DILUENT QUINTUS HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/087	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 2
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Penggantian Diluent Quintus Hematologi Analyzer dilakukan apabila reagen diluent alat Quintus Hematologi Analyzer sisa 3%, untuk memelihara alat Quintus Hematologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Quintus Hematologi Analyzer bagi petugas laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Pastikan alat sudah kosong dari Diluent sebelumnya. 2. Masuk ke (Main Menu), pilih (Advanced), tekan (Reagents) 3. Tekan (View Reagents), highlight reagen yang akan diganti. 4. Tekan (Inactive Reagen), tekan (Back). 5. Pilih (Enter New Reagen), tekan text box di bawah nama reagen. 6. Scan barcode pada kotak container reagen yang akan diganti, tekan (Enter New Reagent) 7. Kembali ke (Advanced), pilih (Maintenance)

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PENGANTIAN DILUENT QUINTUS HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/087	No. Revisi : 00	Halaman : 2 / 2
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

	8. Tekan (Fill), highlight tombol (Fill) hingga berwarna biru, tekan (Ok) 9. Tekan (Ok) jika semua selang reagen dan waste sudah terhubung dengan benar. 10. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	