

 <p>RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun</p> <p>Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com</p>	MEMBERSIHKAN BAGIAN LUAR ALAT SEROLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/024	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Membersihkan bagian luar alat Serologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu hari, untuk memelihara alat Serologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Serologi Analyzer bagi petugas laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersihkan bagian luar alat dengan kain yang bersih. 2. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	