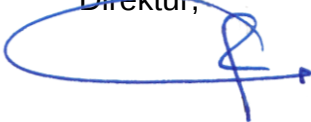


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MEMBERSIHKAN WASTE CHAMBER SYSMEX KX-21 HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/063	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Membersihkan waste chamber Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu bulan (setiap 2500 sampel) untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Pastikan alat dalam status ready. 2. Tekan tombol select. 3. Pilih tombol (7) maintenance. 4. Tekan tombol (1) clean waste chamber. 5. Letakkan cellclean di bawah aspiration probe. 6. Tekan start switch. 7. Tarik cellclean setelah bunyi beep dua kali 8. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	