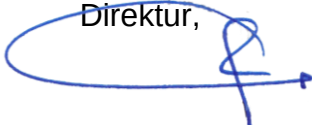


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PENGANTIAN KERTAS PRINTER ALAT KOAGULASI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/091	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Penggantian kertas printer alat Koagulasi Analyzer dilakukan pada saat kertas printer alat Koagulasi Analyzer habis, untuk memelihara alat Koagulasi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Koagulasi Analyzer bagi petugas Laboratorium.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1.Matikan alat . 2.Buka tutup built-in printer. 3. Keluarkan rol kertas printer yang sudah habis. 4. Pasang rol kertas printer yang baru dan masukkan Ujung kertas ke dalam built-in printer. 5. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	