

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PEMERIKSAAN CRP (C-REACTIVE PROTEIN) SEMI-KUANTITATIF		
	No. Dokumen : P/SPO/02/009	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Pemeriksaan CRP dalam pemeriksaan Laboratorium untuk mendeteksi adanya C Reaktif Protein dalam serum pasien, menggunakan metode aglutinasi, yang dilakukan di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis) setiap hari kerja (24 jam)
TUJUAN	1. Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeriksaan CRP bagi petugas Laboratorium 2. Untuk menghindari kesalahan pemeriksaan sehingga tidak merugikan pasien dan dapat dilakukan lebih optimal dan efisien
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No 1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	A. Jika terjadi aglutinasi pada pemeriksaan CRP kualitatif Sampel yang sudah positif diencerkan dengan NaCl 0,9% SEMI KUANTITATIF 1. Sampel yang sudah diencerkan, dikerjakan seperti prosedur pada pemeriksaan kualitatif 2. Pipet 50 µl serum tambahkan 50 µl NaCl 0,9 % (pengenceran 2 x) 3. Kerjakan seperti pemeriksaan CRP Kualitatif 4. Jika masih terjadi aglutinasi, maka serum kembali diencerkan: 5. Kerjakan sampai tidak terjadi aglutinasi. B. Pembacaan hasil - Tanpa pengenceran: 6 mg/L - Dengan pengenceran: 6 mg/L x jumlah pengenceran C. Catat hasil pemeriksaan pada buku kerja
UNIT TERKAIT	