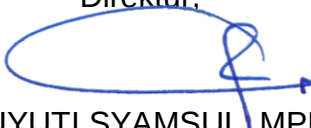


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MEMBERSIHKAN HOLE DETECTOR ALAT KOAGULASI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/076	No. Revisi : 00	Halaman : 1 /1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Membersihkan hole detector alat Koagulasi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu minggu untuk memelihara alat Koagulasi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis).
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Koagulasi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Matikan alat . 2. Lepaskan kuas dari blower. 3. Bersihkan bagian hole detector dengan blower. 4. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	