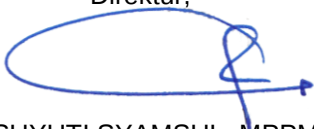


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	MEMBERSIHKAN WBC/ RBC TRANSDUCER APERTURE SYSMEX KX-21 HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/315	No. Revisi :	Halaman : 1 dari 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Membersihkan WBC/ RBC transducer aperture Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan apabila hasil WBC/ RBC alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer error, untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Pastikan alat dalam status ready. 2. Tekan tombol select. 3. Tekan tombol (7) maintenance. 4. Tekan tombol (4) drain TD chamber. 5. Matikan alat. 6. Tunggu 30 detik. 7. Buka front cover. 8. Buka transducer cover thumbscrew. 9. Serap cairan di bawah transducer. 10. Bersihkan transducer 11. Tutup transducer cover dan front cover 12. Hidupkan alat. 13. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	