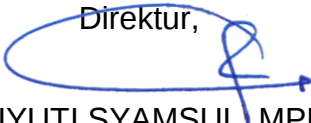


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	PENGANTIAN FUSE ALAT KOAGULASI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/089	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Penggantian fuse alat Koagulasi Analyzer dilakukan pada saat sekring alat Koagulasi Analyzer mati, untuk memelihara alat Koagulasi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis).
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Koagulasi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Matikan alat. 2. Keluarkan tutup fuse holder di bagian belakang alat 3. Ganti sekring dengan spesifikasi yang telah ditentukan. 4. Pasang kembali tutup fuse holder ke alat. 5. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist
UNIT TERKAIT	