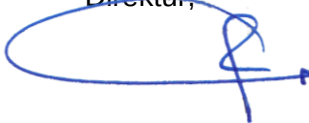


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MEMBERSIHKAN MEJA STRIP URINE CHEMISTRY ANALYZER (SEBELUM ALAT DINYALAKAN)		
	No. Dokumen : P/SPO/02/105	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM Pembina Tingkat I NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Membersihkan meja strip Urine Chemistry Analyzer dilakukan sebelum alat dinyalakan (pagi hari), untuk memelihara alat Urine Chemistry Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Urine Chemistry Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Pastikan alat masih dalam keadaan mati. 2. Lepaskan meja strip dari instrument 3. Bersihkan meja strip dengan kain yang lembab. 4. Keringkan meja strip di udara 5. Pasang kembali meja strip pada instrument 6. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist
UNIT TERKAIT	