

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  <p><b>RSUD Sultan Imanuddin<br/>Pangkalan Bun</b></p> <p>Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun<br/>Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581<br/><a href="http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id">http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id</a><br/>email : rsudpbun@gmail.com</p> | <b>MEMBERSIHKAN PERMUKAAN ALAT GDS STIK</b> |                                                                                                                                                                                                         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Dokumen :<br><br>P/SPO/02/017           | No. Revisi :<br><br>00                                                                                                                                                                                  | Halaman :<br><br>1/1 |
| <b>STANDAR PROSEDUR<br/>OPERASIONAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanggal Terbit :<br><br>16 Januari 2017     | <p>Ditetapkan<br/>Direktur,</p>  <p>dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM<br/>Pembina Tingkat I<br/>NIP. 19680807 200003 1 006</p> |                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENGERTIAN   | Membersihkan permukaan alat GDS stik dilakukan satu kali dalam satu hari, untuk memelihara alat GDS stik dalam laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium ( Analis ) |
| TUJUAN       | Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat GDS stik bagi petugas Laboratorium                                                                                                                    |
| KEBIJAKAN    | Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun                                                                       |
| PROSEDUR     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersihkan alat dengan kain yang bersih.</li> <li>2. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.</li> </ol>                                                              |
| UNIT TERKAIT |                                                                                                                                                                                                                         |