

 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com	MEMBERSIHKAN PIPETTE GUIDE ALAT KOAGULASI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/079	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr.SUYUTI SYAMSUL, MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			

PENGERTIAN	Membersihkan pipette guide alat Koagulasi Analyzer dilakukan satu kali dalam satu hari untuk memelihara alat Koagulasi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Koagulasi Analyzer bagi petugas Laboratorium
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD SultanImanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Matikan alat. 2. Buka sekrup pipette guide. 3. Bersihkan pipette guide dengan kain basah. 4. Gunakan sabun detergen apabila kotoran susah dihilangkan. 5. Jangan menggunakan cairan pembersih apapun selain air dan detergen netral 6. Bilas dengan kain basah dan usap dengan kain lembut yang kering 7. Tutup kembali sekrup pipette guide 8. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	