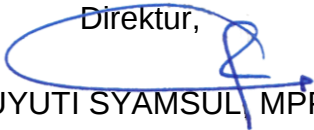


 RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Jalan Sutan Syahrir No 17 Pangkalan Bun Telp. (0532)21404, Fax. (0532) 23581 http://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id email : rsudpbun@gmail.com STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	PENGgantian TANGKI LIMBAH SYSMEX KX-21 HEMATOLOGI ANALYZER		
	No. Dokumen : P/SPO/02/097	No. Revisi : 00	Halaman : 1 / 1
	Tanggal Terbit : 16 Januari 2017	Ditetapkan Direktur,  dr. SUYUTI SYAMSUL MPPM NIP. 19680807 200003 1 006	

PENGERTIAN	Penggantian tangki limbah Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dilakukan pada saat tangki limbah alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer penuh, untuk memelihara alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer dalam Laboratorium di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Sultan Imanuddin oleh petugas laboratorium (Analis)
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk pemeliharaan alat Sysmex KX-21 Hematologi Analyzer bagi petugas Laboratorium.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun No.1 Tahun 2017 pasal 3, Tentang Kebijakan Pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
PROSEDUR	1. Siapkan tangki limbah yang kosong. 2. Lepaskan selang pada tangki limbah yang lama 3. Pasang selang pada tangki limbah yang baru 4. Dokumentasikan pada lembar Maintenance Checklist.
UNIT TERKAIT	